

バイタルサインを

1.2.3
数値

波形

音

でリアルに表現！



救急・救命トレーニングシステムの決定版！

救トレ[®]



✦ 操作性が抜群！

✦ 豊富な心電図波形！

詳細はこちら↑

救トレ[®]

ポータブル

ネット環境がなくても使える！

救トレ[®]

クラウド

スマホ・タブレットだけで
すぐ使える！



タブレット/PC利用時のコントローラ画面



見慣れたモニタ画面

設定した閾値を超えると
数値点滅・アラート音！

詳細はこちらのURLまで！

<https://qtr.emersim.jp>



生体情報モニタシミュレータによる
救急トレーニングシステム

救トレ[®]のポイント

✓操作性が抜群！


✓廉価！

✓すぐ買える！ (<https://qtr.emersim.jp>)

ポータブル 49,800円(税込)
クラウド 1日1ブース使い放題
8,800円(税込)



製品サイト

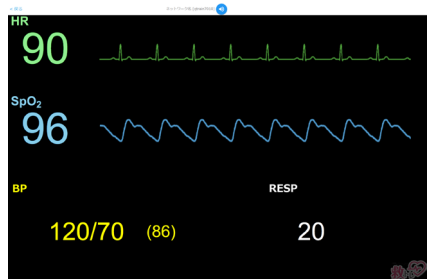

見慣れたモニタ画面

バイタルサインをリアルに表現！！



設定した閾値を超えると、
数値点滅・アラート音！

救急車などの効果音も！

救トレが対応している波形

| | | |
|--|--|--|
| 〈心電図〉 正常洞調律 1度房室ブロック Mobitz I型2度房室ブロック Mobitz II型2度房室ブロック 心停止 | 心房細動 心房粗動 ジャクシヨナル 左脚ブロック 右脚ブロック ST上昇 持続性心室頻拍 | トルサード・ド・ポワント 心室細動 心室頻拍 〈動脈血酸素飽和度〉 正常 血管灌流不全 |
|--|--|--|



スマホ利用時の
コントローラ画面



タブレット/PC利用時のコントローラ画面



訓練利用時の様子

ワンタップで全バイタルをプリセット値に一括変更！

ユーザは広がり続けています！！

北海道から沖縄まで！そして国外でも！

- 日本国内
- モンゴル
- マレーシア
- カンボジア
- アイルランド



←2017年7月の発売から既に全国、世界へ！

利用例5) 搬送訓練などで利用 (モバイルバッテリー利用)



製品サイトにはさまざまな利用シーンでの利用例も公開しています

■ご用意頂くもの

- ①タブレット端末
- ②スマホやタブレット端末
- ③モバイルバッテリー
- ④USBケーブル
- ⑤マネキン・人形等

※マネキン・人形等は、自身用にある用途のものを使用。あるいは他社メーカ製のマネキン・人形等を使用する場合は、ご用意下さい。



価格表 (1/2 ページ)

■救トレ ポータブル

| | 購入形態 | 価格 |
|---------------------|------|---|
| ご購入(ハードウェア) | 買い切り | 税込 49,800 円(税抜 45,273 円) (※別途送料を申し受けます。全国一律 税込 1,100 円(税抜 1,000 円)) |
| バージョンアップサービス (※) | 更新1回 | 税込 21,780 円(税抜19,800 円) |

※お手持ちの「救トレ ポータブル」を送っていただき、ご依頼時における最新バージョンにバージョンアップし、出荷時に同梱しているシナリオも最新のものとして返送するサービスです。以下の条件にご同意の上、お申込下さい。

1. 送っていただく「救トレ ポータブル」のシナリオは初期化されます。出荷時に同梱しているシナリオのみ入った状態での返送となります。オリジナルで作成されたシナリオが入っていた場合も消去されますので、予めご了解の上申込下さい。
2. 弊社宛にお送りいただく際の送料はご負担下さい。返送時の送料は当社負担いたします。なお送付時にはケースに入れる、緩衝材でくるむ等の保身に御留意下さい。
3. 到着後 2 週間以内に返送いたします。発送から返送までの期間は「救トレ ポータブル」をお使いになれませんので、トレーニング予定が無い期間にお申し込み下さい。
4. 本サービス申込は[お問い合わせフォーム](#)から申込ご連絡ください

継続的に機能追加等のバージョンアップをしています。どんどん便利になっていきますので、バージョンアップサービスを是非ご活用下さい。ご参考に、最近の主なバージョンアップについて以下に掲げます。

2021.3.5 Ver.2.0.0 任意画像を登録・呼び出し表示する機能、「シナリオデータの取り出し・取り込み」機能(複数台利用の方に便利な機能です)、電源 OFF ボタン

2021.6.8 Ver.2.2.0 除細動器(電気ショック)機能を追加

2021.9.16 Ver.2.3.0 血圧を任意のタイミングで反映するボタンの追加。バイタル値の変化秒数の設定機能を追加

2022.4.25 Ver.2.3.2 血圧表記として上下測定不能「-/-」指定を追加

2022.10.25 Ver.2.4.0 シナリオ複製時にシーンも複製する機能を追加

2024.5.28 Ver.2.4.2 UI 改善、挙動改善など

その他のバージョンアップについては当社サイトにて御確認ください。

<https://qtr.emersim.jp/release notes.html>



ペンギンシステム株式会社



価格表 (2/2 ページ)

■救トレ クラウド

| | 購入形態 | 価格 |
|-----------------|---------------|---|
| クラウド上のソフトウェア利用権 | 利用量に応じたチケット料金 | 1 ブース 1 日(24 時間)使い放題チケット 税込 8,800 円 (税抜 8,000 円) (※複数ブースでの開催時はブース数分のチケットをご購入ください。) 事前動作確認用 1 時間チケットも自動付与します(※) |

※事前動作確認用 1 時間チケット

「トレーニング開催前に短時間でもよいので当日のセッティングで動作確認がしたい。その際に 1 日券を 1 枚使ってしまうのはもったいない。なんとかならないか」というご要望にお応えしたものです。

「1 日券チケット 1 枚ご購入時に事前動作確認用 1 時間チケット 1 枚を自動付与」いたします。

マイページの「事前動作確認」コーナーから事前動作確認の予約をして事前動作確認をしていただけます。ご利用下さい。