



ユーザーマニュアル  
Ver. 1.9

2023年8月22日

ペンギンシステム株式会社



## 目次

1. 「救トレ® クラウド」とは .....	4
2. 「救トレ® クラウド」利用までの手続きについて .....	5
3. はじめよう！ .....	5
3.1 『モニター』を用意しよう.....	5
3.2 『コントローラー』で操作しよう.....	7
A) 音声関係アイコンについて.....	8
B) 除細動器(電気ショック)関係アイコンについて.....	8
C) シナリオ、シーンについて.....	9
D) 『モニター』側の表示 On/Off について.....	11
E) 血圧を任意のタイミングで反映する.....	13
F) ストップウォッチ機能について.....	14
G) バイタルサイン値の変更について.....	14
H) 血圧表記として上下測定不能「-/-」指定をする.....	15
I) 波形の選択 .....	16
J) 任意の画像を表示.....	18
4. シナリオの追加・編集など、各種設定.....	20
4.1 シナリオの追加・編集.....	22
A) シナリオの追加 .....	22
B) シーンの追加 .....	23
C) シナリオ/シーンの編集・削除・複製.....	24
D) シナリオ内シーンにおける血圧上下測定不能の入力方法.....	26
4.2 共通設定 .....	27
4.3 画像設定 .....	28
5. よくある質問と答.....	29


本説明書 Version	発行日	内容
1.0	2021/6/7	初版
1.1	2021/6/8	誤記修正
1.2	2021/6/9	除細動(電気ショック)模擬機能について追記
1.3	2021/6/11	除細動器模擬機能について注記追加
1.4	2022/1/18	血圧を任意のタイミングで反映する機能を追記
1.5	2022/4/26	血圧上下測定不能「-/-」表示指定方法を追記
1.6	2022/7/7	記載順序を整理
1.7	2022/9/13	細部更新
1.8	2023/5/9	細部更新
1.9	2023/8/22	細部更新

「救トレ<sup>®</sup>」はペンギンシステム株式会社の登録商標です

## 1. 「救トレ<sup>®</sup> クラウド」とは

「救トレ<sup>®</sup> クラウド」は、救急・救命トレーニング時に使用するための製品です。「救トレ<sup>®</sup> クラウド」では、受講者が利用する模擬バイタルサインモニターを『モニター』と呼びます。トレーナー(インストラクター)は『モニター』とは別に『コントローラー』と呼ぶ画面を利用することができ、バイタルサインを自由に変化させることができます。

『モニター』画面

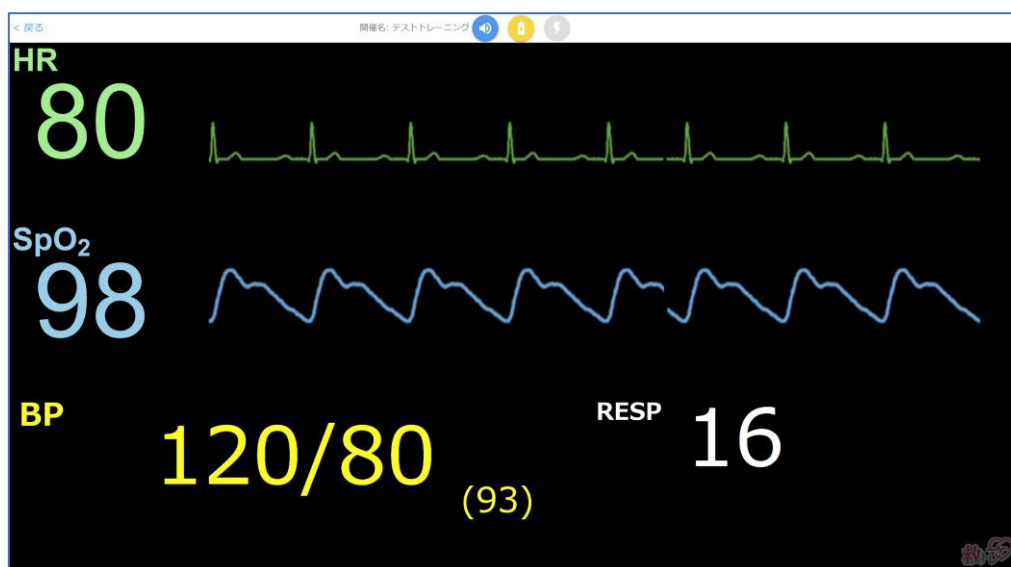

『コントローラー』画面



特別な機械類は一切必要なく、お手持ちのパソコンやタブレット等のブラウザからアクセスして使用します。ブラウザ上に『モニター』や『コントローラー』が表示されます。

## 2. 「救トレ<sup>®</sup> クラウド」利用までの手続きについて

---

別に用意しております「[クイックスタートガイド](#)」にてご確認ください。

本「ユーザーマニュアル」では、「救トレ<sup>®</sup> クラウド」の実際の操作について記します。

## 3. はじめよう！

---

別紙「[クイックスタートガイド](#)」に記載した手順でトレーニングの「開催予約」を行いますと、『コントローラー』の URL と『モニター』の URL をセットで得ることができません。

(例)


コントローラーURL : <https://xxx.xxx.emersim.jp/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/>

モニターURL : <https://xxx.xxx.emersim.jp/yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/>

このセットについて、「救トレ<sup>®</sup>」では「1 ブース」とも呼びます。シミュレーショントレーニング(シナリオトレーニング)において1つのトレーニングブースにトレーナー(インストラクター)と受講者が集まるイメージです。



『コントローラー』画面例

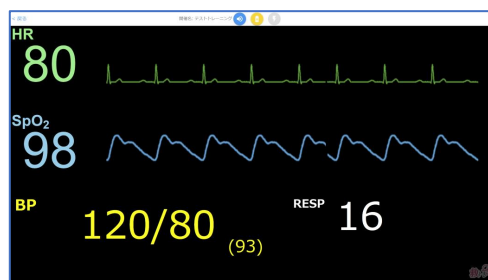

『モニター』画面例

### 3.1 『モニター』を用意しよう

---


『モニター』URL にコンピュータやタブレットなどのブラウザでアクセスすると次ページのような画面が表示されます。

モニターURL 例 : <https://xxx.xxx.emersim.jp/yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/>



画面上部には「開催予約」時に設定したトレーニング名が表示されています(ただし先頭 12 文字まで)。その右側にあるのは音量調整ボタンです。

それでは画面中央の『モニター』ボタンを押しましょう。

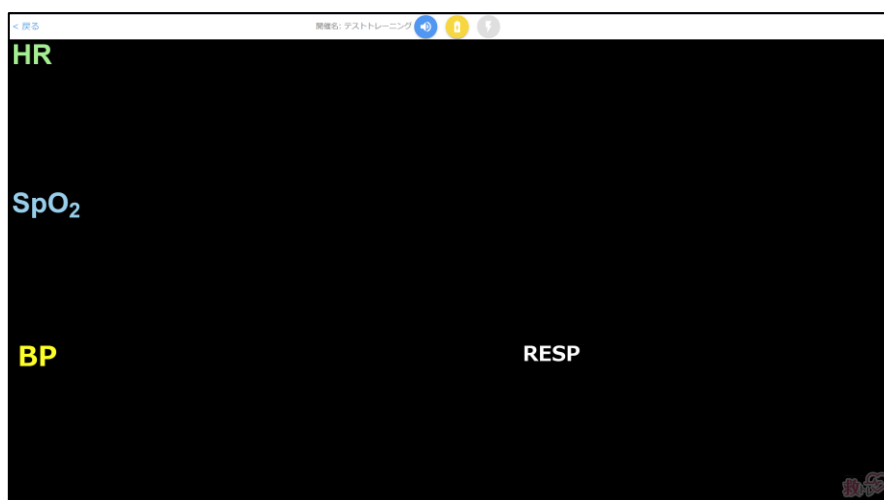

『モニター』画面の初期表示です。バイタルサイン 4 種類の名前だけが表示されており、実際の値や波形は表示されません。

受講者が心拍計や SpO2 計などのバイタルサインセンサ装置を装着する動作をしたタイミングに、トレーナー(インストラクター)が『コントローラー』側で、該当バイタルサインの表示を「On」にしてあげることで、該当バイタルサインの数値や波形が表示されるようになります。詳しくは次項でご説明します。

### 3.2 『コントローラー』で操作しよう

『コントローラー』URL にコンピュータやタブレットなどのブラウザでアクセスすると以下のような画面が表示されます。

コントローラーURL 例 : <https://xxx.xxx.emersim.jp/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/>



画面上部には「開催予約」時に設定したトレーニング名が表示されています(ただし先頭 12 文字まで)。その右側にあるのは音量調整ボタンです。

画面中央で、登録済みのシナリオから、今回トレーニングするシナリオを選ぶことができます。シナリオを選びましたら「コントローラー」ボタンを押してコントローラー画面に入りましょう。(なお、シナリオはコントローラー画面に入ってからでも自由に選択し直せます)

次ページからコントローラー画面の説明をいたします。



## A) 音声関係アイコンについて

上部に3つある音声関係アイコンの用途は以下の通りです。



音量調整/ミュート（赤がミュート状態、青はミュート解除状態です）  
バイタルサイン音は『モニター』側で出すものとして、『コントローラー』側ではミュート状態を初期設定としています



各種効果音を再生することができます。2021年6月時点での収録効果音は「アラート音2種類」「救急車サイレン」「赤ちゃんの泣き声」「ナースコール」「電話呼び出し音」「嘔吐音」です。また、それら効果音の停止、および警告音の停止もできます



各バイタルサイン値が閾値を超えた際に発出される警告音を停止させたいときに使うボタンです。バイタルサイン値を変更はしないが、トレーナー(インストラクター)がトレーニングを一時止めて、トレーニング内容について説明をする際などに便利です。

## B) 除細動器(電気ショック)関係アイコンについて

上部に2つある除細動器(電気ショック)関係アイコンの用途は以下の通りです。



左側の「充電」アイコンを押しますと除細動器への充電音が流れます。

電気ショックが可能になりますと、「充電」アイコンが灰色に変わり、右側の「ショック」ボタンが黄色に点滅します。

なお、「充電中」を示す「ブブブブ…」音、「充電完了」を示す「ブー—」音が流れているあいだはバイタルサイン音が小さくなりますが、トレーニング受講者が充電関連音をしっかり認識するために、音量のバランスを調整しているものです。



右側の「ショック」ボタンを押すと、電気ショック音が流れます。波形にもそれに伴う乱れが生じます。

なお、この除細動器(電気ショック)関係アイコン2つは『モニター』側にもありますので、『モニター』に利用する機器がタッチパネル式であれば、受講者自身が押すことも可能です



### C) シナリオ、シーンについて

『コントローラー』画面を立ち上げたとき、右上には設定済のシナリオが開いて表示されています。救トレ<sup>®</sup>は、シミュレーショントレーニング(シナリオトレーニング)を行うための模擬バイタルサインモニターです。ここで「シナリオ」と呼ぶのは例えば「アナフィラキシー」時の救急対応についてシミュレーショントレーニングをしたい際に、一つのシナリオに沿ってトレーニングを進めていく、ということを指します。以下、このシナリオについて説明します。

<b>【救急】 アナフィラキシー</b>
外来病棟。30歳男性が右下腹部の痛みのため来院し、虫垂炎と診断された。抗生物質の静脈注射投与を始めるところ
<b>開始(正常)</b>
<b>HR:80 (1°block) SpO2:98 (Normal) BP:120/80 RESP:16</b>
右下腹部に中程度の痛み。E4V5M6
<b>増悪</b>
<b>HR:130 (Atrial fibril.) SpO2:- (Poor) BP:70/56 RESP:36</b>
喘鳴し悪化。E2V3M4
<b>介入</b>
<b>HR:100 (Normal) SpO2:96 (Normal) BP:100/60 RESP:24</b>
アドレナリン0.5mg筋肉注射後。酸素を非再呼吸式リザーバマスクで10L/分。E3V5M6
<b>心停止</b>
<b>HR:140 (VF) SpO2:- (Poor) BP:- RESP:4</b>

シナリオ部分を拡大して示します。ここでは「アナフィラキシー」に関するトレーニングをするシナリオを例としました。シナリオ名「【救急】アナフィラキシー」の下にシナリオの概要を示す欄があります。ご自身でシナリオを作成することができますので(後述)、病院の状況や患者さんの情報などを記して下さい。


以下には「バイタルサイン値4つのセット」を幾つでもセットできます。これを「救トレ<sup>®</sup>」では「シーン」と呼んでいます。

上例だと最初のシーンが「開始(正常)」であり、心拍、SpO2、血圧、呼吸の値をプリセットしてあります。また、心拍・SpO2については波形も選択してあります。


以後「増悪」「介入」「心停止」…といったシーンを用意してあります。右側のスライドバーを下に動かすことでもっと下のシーンも画面に出せます。

トレーナー(インストラクター)は、受講者の対処状況を見ながら、適切なタイミングで「シーン」をタップ(クリック)します。ワンタップ(ワンクリック)で4つのバイタルサイン値を一括してプリセットしてある値に変えることができます。

「シーン」それぞれにも周囲の状況や患者の情報が設定してあります(設定できます)。また「シナリオ」名の右側にある「▼」から、シナリオ選択をやり直すこともできます。

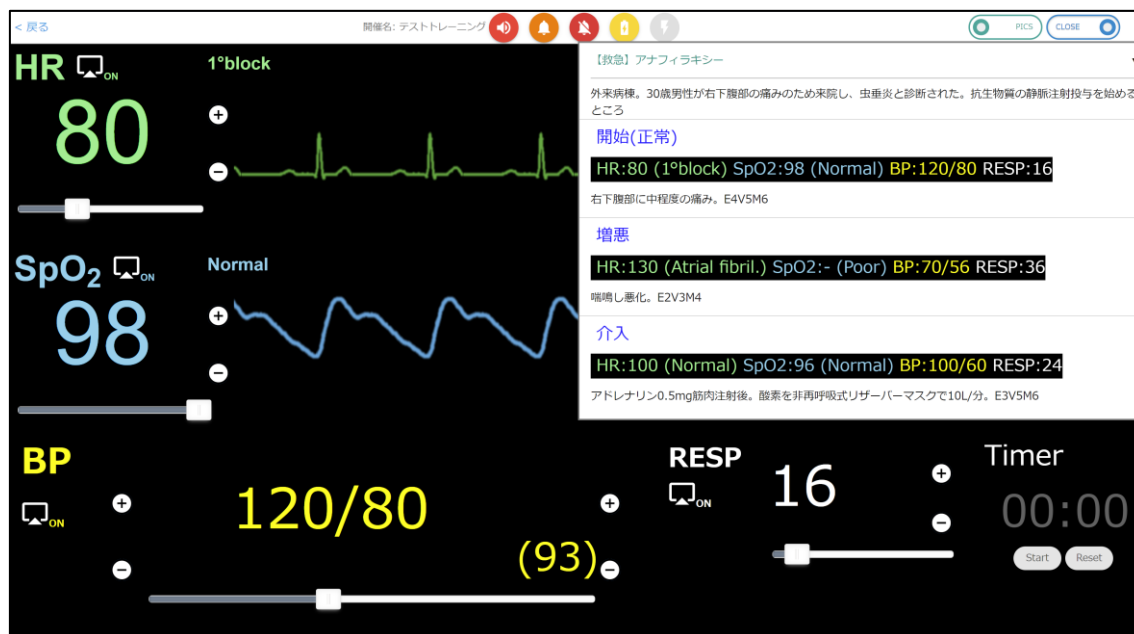


画面右上の「CLOSE」ボタンを押すことで、シナリオ表示を閉じることもできます。以下のような表示になります。

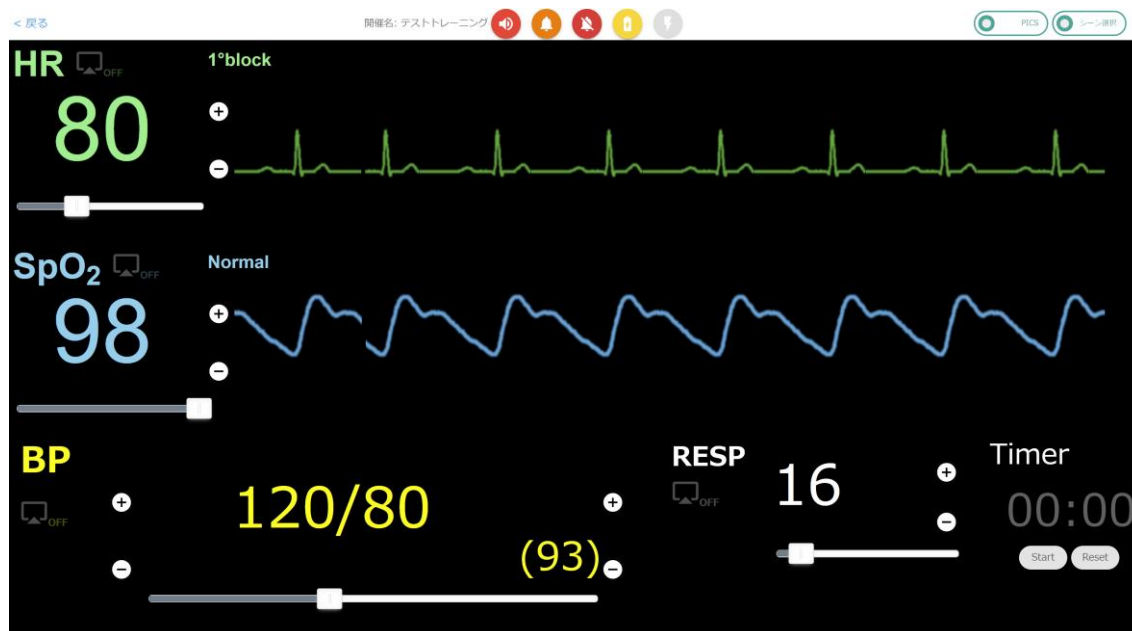

D) 『モニター』側の表示 On/Off について

なお、バイタルサイン4種類それぞれに『モニター』への表示を On/Off するためのアイコンが設置されています。受講者が当該バイタルサインを測定する動作あるいは意思を示したときにトレーナー(インストラクター)がこのアイコンを押すことで『モニター』側に当該バイタルサインが表示されます。

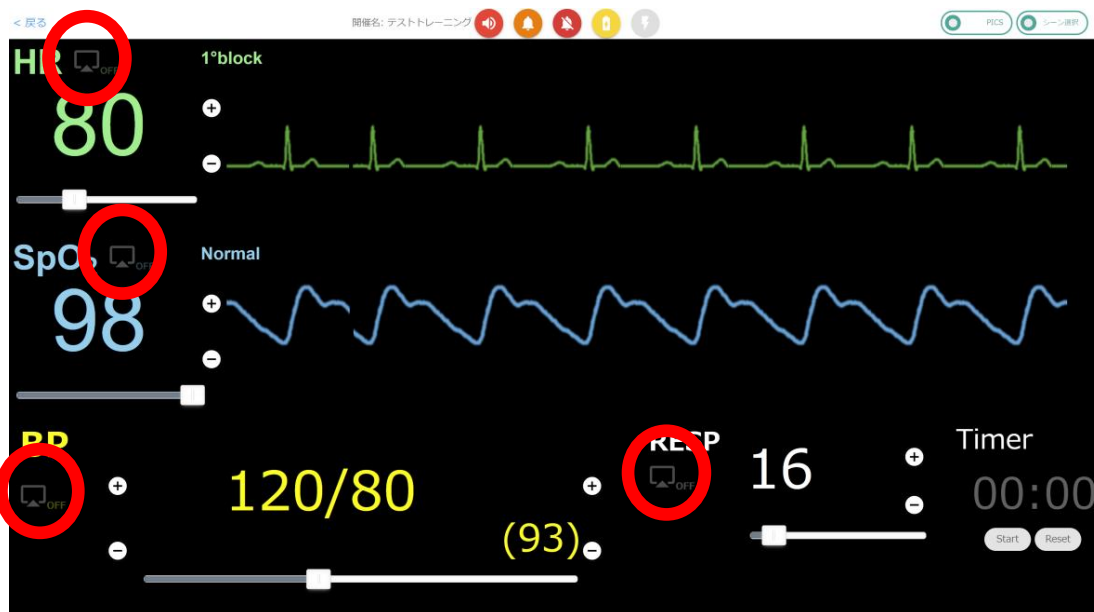


これが初期状態。『モニター』側の表示 OFF です。




これが『モニター』側の表示を On にした状態です。

下図は、『コントローラー』側で HR と BP について「表示 On」操作をしたことにより、『モニター』側に HR の数値と波形、BP の数値が表示された例です。

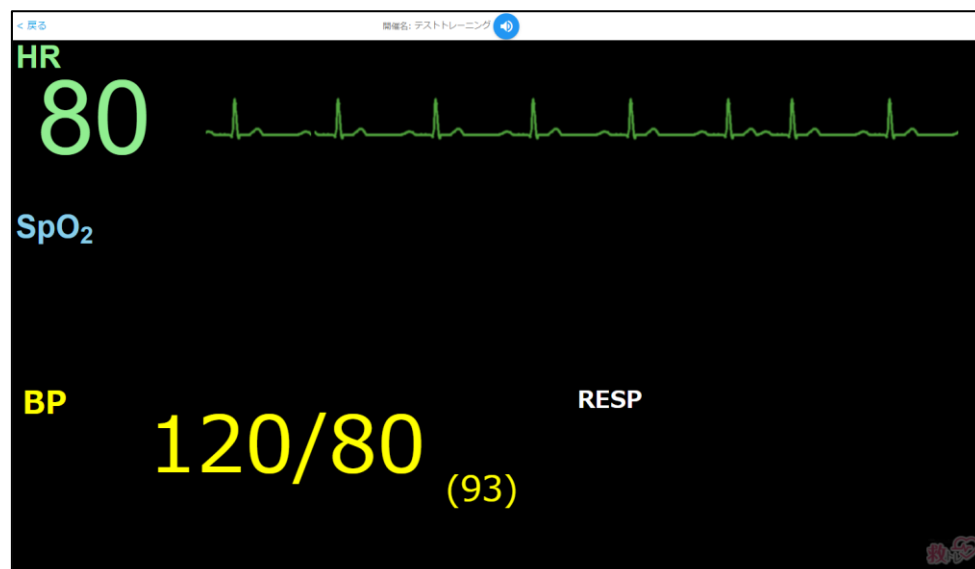

さらに受講者が「SpO2 の測定」「呼吸の測定」動作あるいは意思を示した場合は、同様に『コントローラー』側で「表示 On」操作をすることで以下のように『モニター』側の表示がなされます。

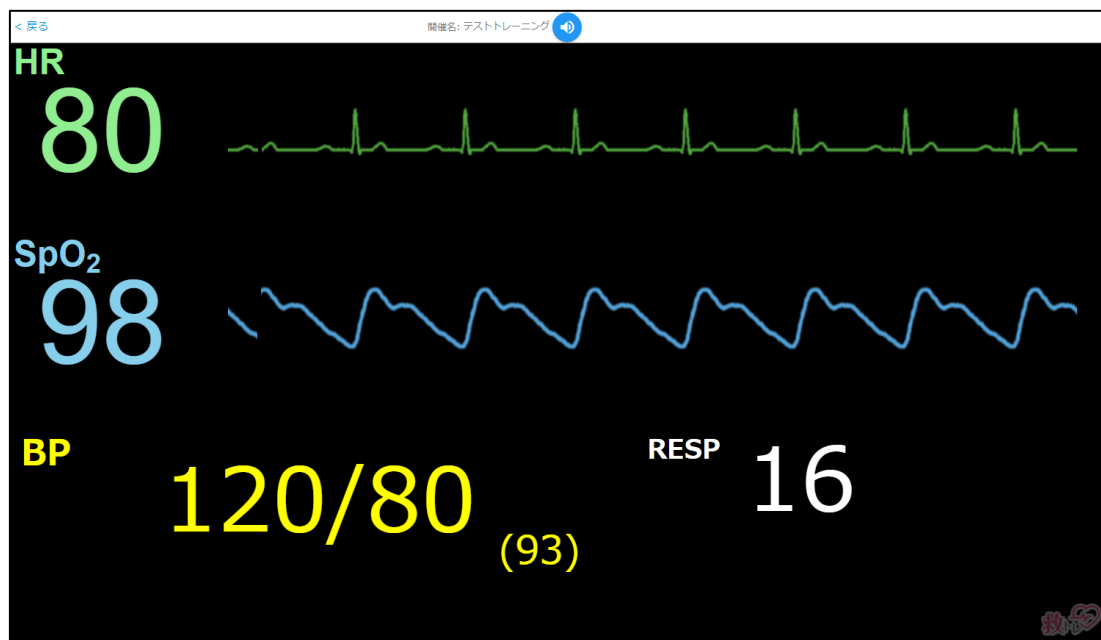


E) 血圧を任意のタイミングで反映する

『コントローラー』画面の左下「BP」の下方に「血圧変更」ボタンがあります(赤丸の箇所)。




コントローラー側で「シナリオ」内の「シーン」としてプリセットしておいたバイタルサイン値のセットにワンタップで切り替えられるのが「救トレ」の便利なところですが、血圧のみはワンタップした際にもモニター画面側では変化を起こしません。その代わりに当該ボタンが以下のように(赤丸の箇所)、黄色になって点滅します。

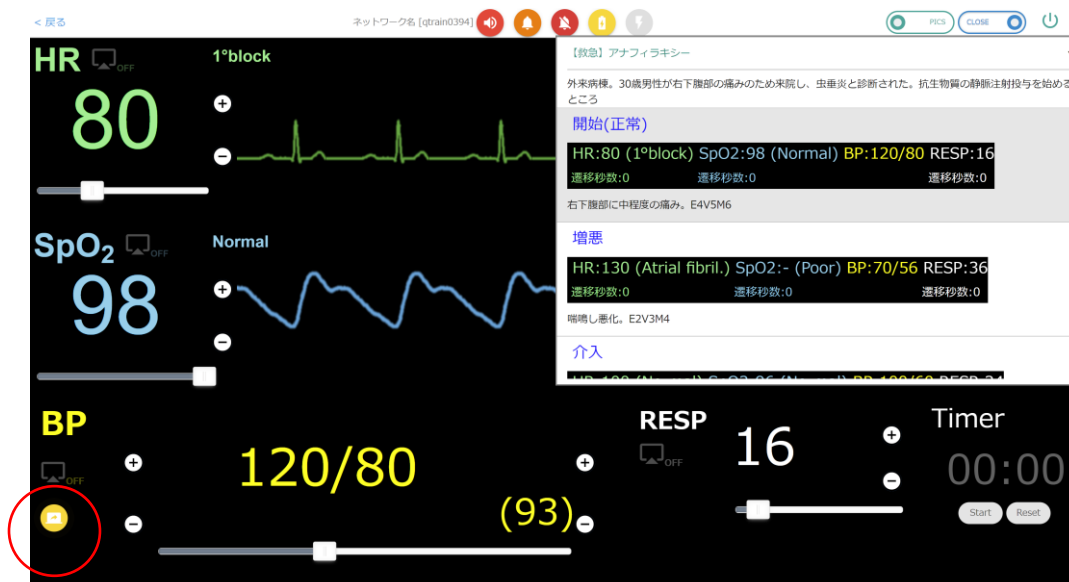

トレーニング受講者が明に「血圧を測る」という意思表示あるいは動作をした際に当該ボタンを押すことで、血圧がプリセットした値に変化します。

## F) ストップウォッチ機能について


『コントローラー』画面右下にある「Timer」は特定の用途を想定したものではありません。受講者が何かしらの対応に要した時間を測定する、など自由にご利用下さい。Start/Stop のトグルボタンと、Reset ボタンがあります。

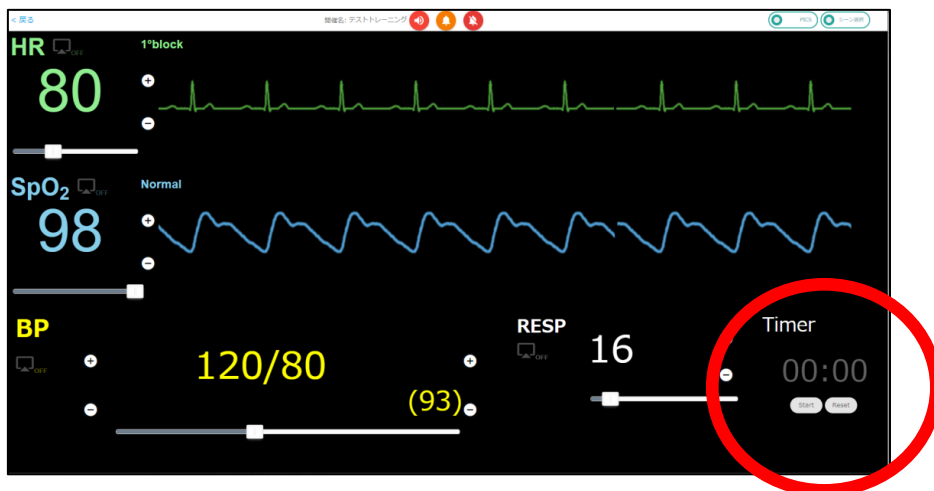

## G) バイタルサイン値の変更について


シナリオ機能から4バイタルサイン値を一括で変える以外に、個々のバイタルサイン値を自由に変更することも可能です。3つのやり方があります。

(ア)スライドバーによる操作

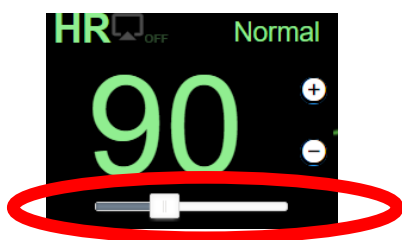


スライドバーを左に動かすとバイタル値が小さくなり、スライドバーを右に動かすとバイタル値が大きくなります

(イ)数字キーによる操作

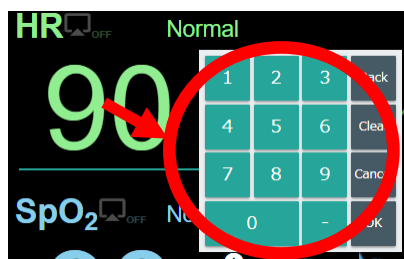

数字をタップすると数字キーが表示されます。数字キータップ後、「OK」をタップするとバイタル値がタップした値へ更新されます。

(ウ) +-ボタンによる操作

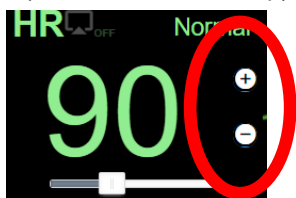


「+」ボタンをタップするとバイタル値が大きくなります。「-」ボタンをタップするとバイタル値が小さくなります。


#### H) 血圧表記として上下測定不能「-/-」指定をする

血圧が上下(収縮期血圧・拡張期血圧)ともに測定不能だという状態を指定することが可能です。


コントローラー画面にて血圧表記の数値部分(以下の例で言うと「120/80」という表示部分をクリック(タップ)すると、数値パッドが表示されます。ここで「-」を入力し、「OK」を押下ください。

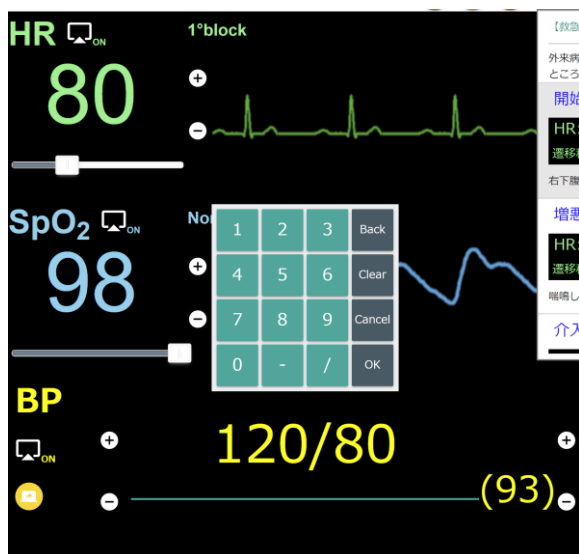

以下の表記となります。

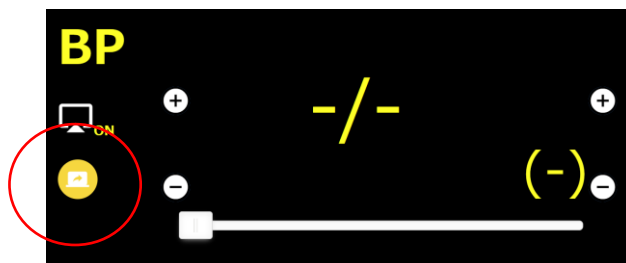

この状態で画面左端の黄色い「血圧モニター反映」ボタン(赤丸で囲ったボタン)を押下すると、モニターにも以下のように反映されます。

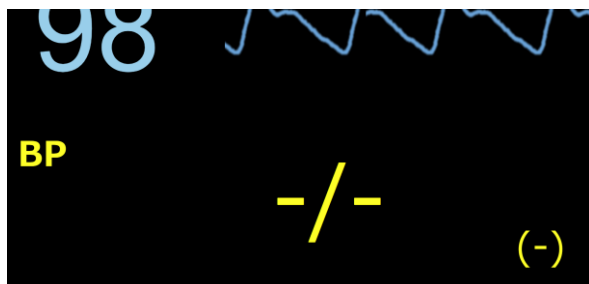

シナリオとして予め指定しておくこともできます。[シナリオ内シーンにおける血圧上下測定不能の入力方法](#)を参照ください。

l) 波形の選択

「救トレ®」が用意している波形は以下の通りです。


●心拍数 Heart Rate で表示できる波形

- 1) 正常洞調律 (Normal - NSR)
- 2) 1度房室ブロック (1° block)
- 3) Mobitz I型2度房室ブロック (2° block(Mobitz I))
- 4) Mobitz II型2度房室ブロック (2° block(Mobitz II))
- 5) 心停止 (Asystole)
- 6) 心房細動 (Atrial fibrillation)
- 7) 心房粗動 (Atrial flutter)
- 8) ジャンクショナル (Junctional)
- 9) 左脚ブロック (LBBB)
- 10) 右脚ブロック (RBBB)
- 11) ST上昇 (ST elevation)
- 12) 持続性心室頻拍 (SVT)
- 13) トルサード・ド・ポワント (Torsades de pointes)
- 14) 心室細動 (VF)
- 15) 心室頻拍 (VT)

●動脈血酸素飽和度 SpO2 で表示できる波形

- 1) 正常 Normal
- 2) 血管灌流不全 Poor perfusion


これらを変更したいときは『コントローラー』画面の「波形名」部分か「波形」部分、  
下図赤い丸で示したあたりをタップ(クリック)してください。

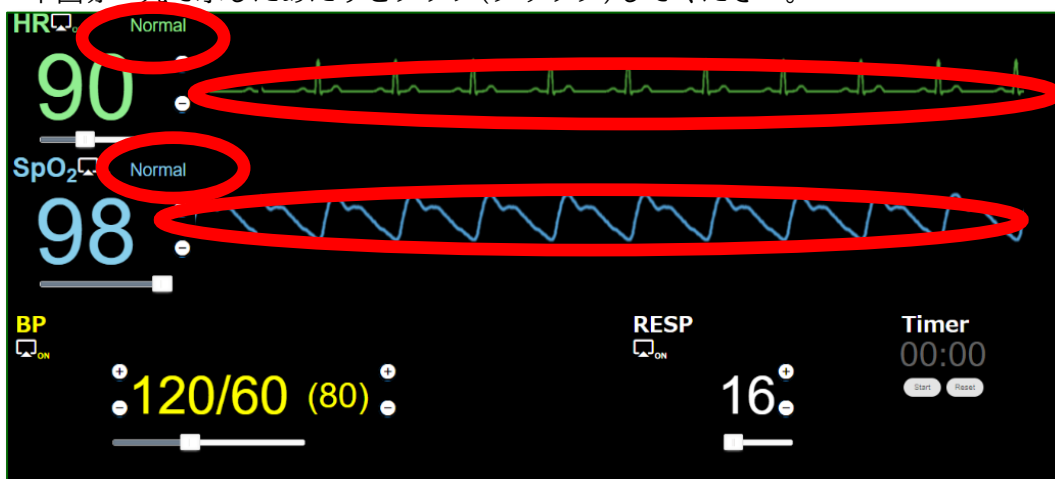




波形選択メニューが表示されますので、波形を選択して下さい。

(パソコンでの表示例)

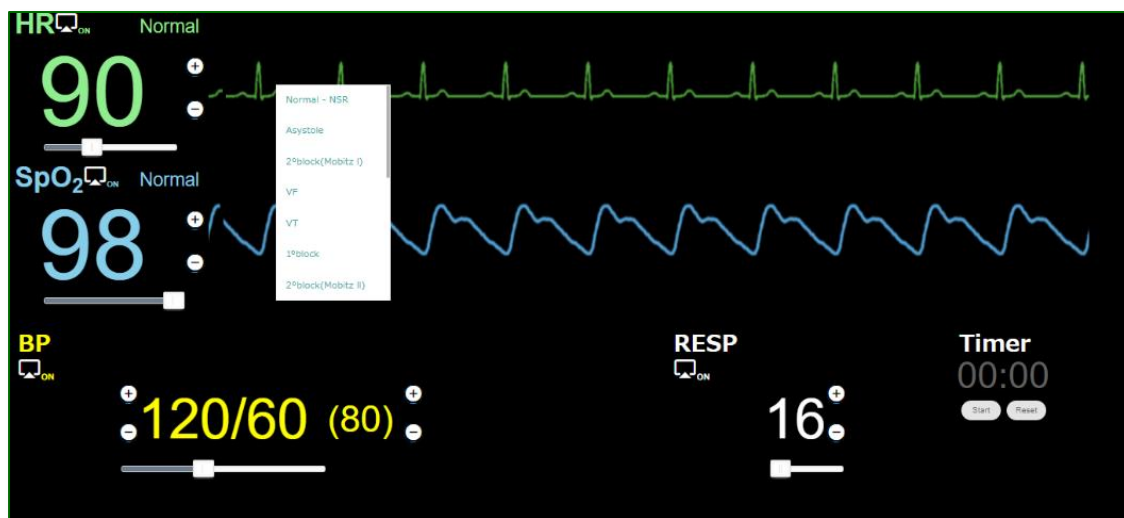


(スマートフォンでの表示例)

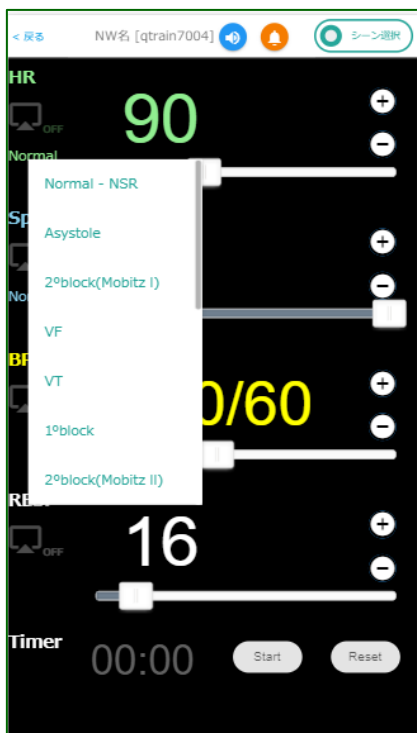


J) 任意の画像を表示

予め設定しておいた任意の画像をバイタルサイン値の上に表示することができます。  
(画像の設定については4-3で後述します)


『コントローラー』画面の右上、右から2番目の「PICS」ボタンを押して下さい。

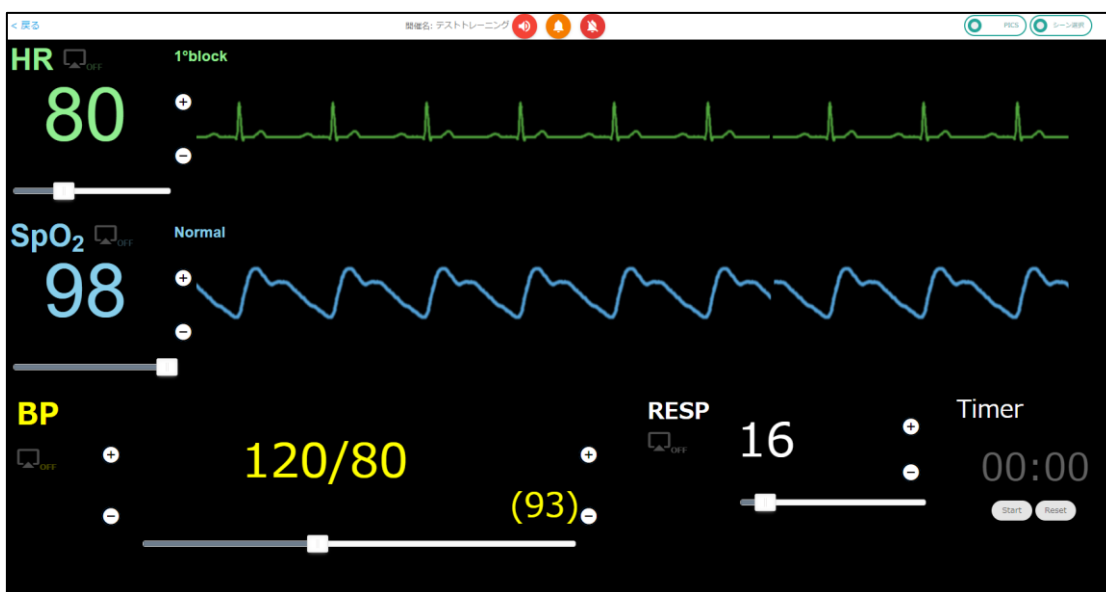


下のように表示されます。ここで「未選択 ▼」となっている箇所から画像を選択します。

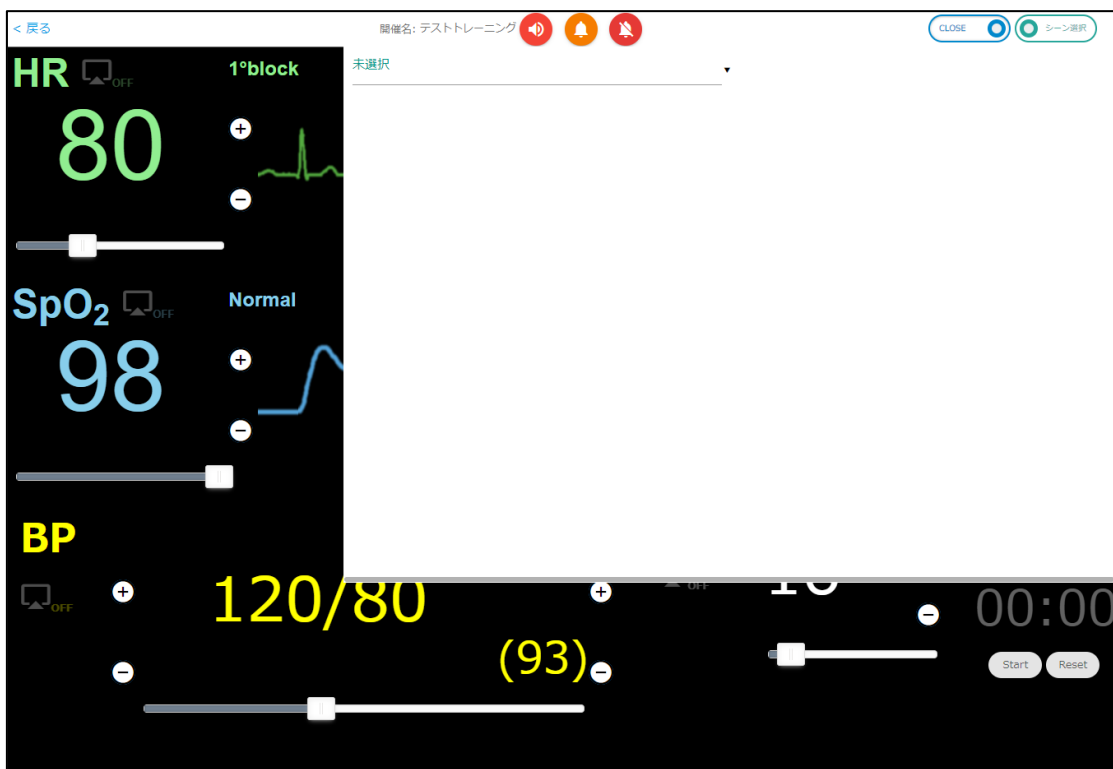

『コントローラー』側で例えば以下のような画像を選んだとします。

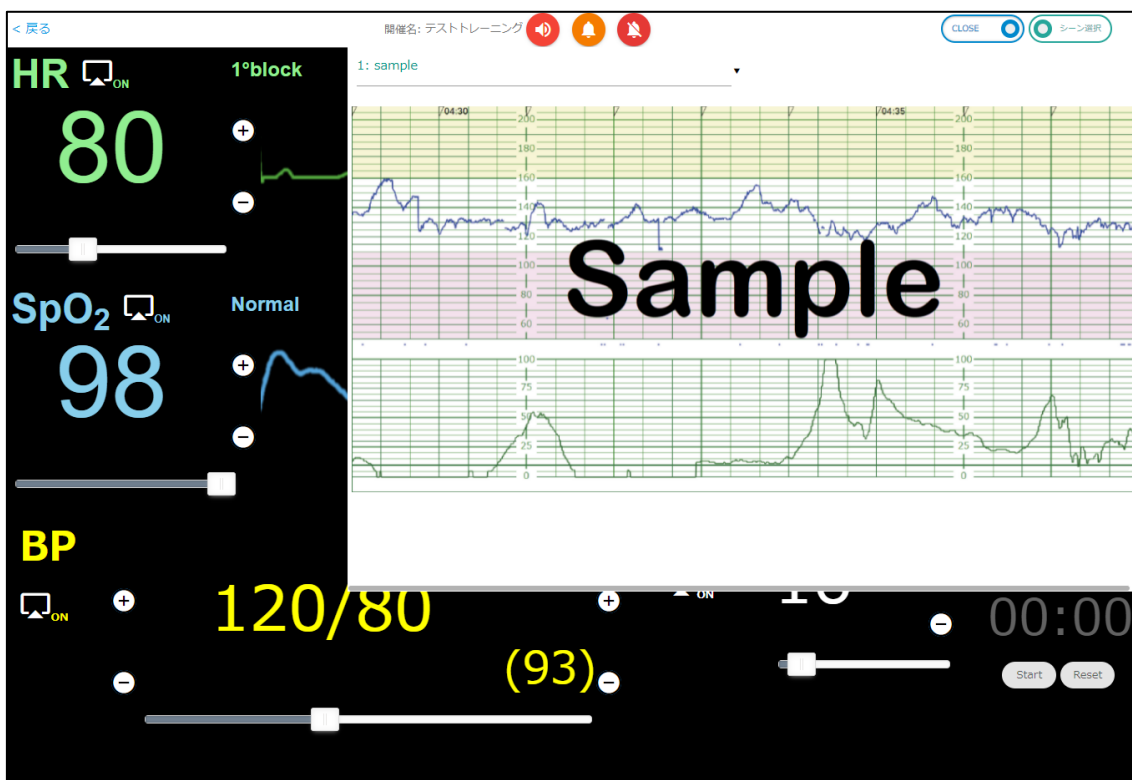

『モニター』側では以下のように表示されます。

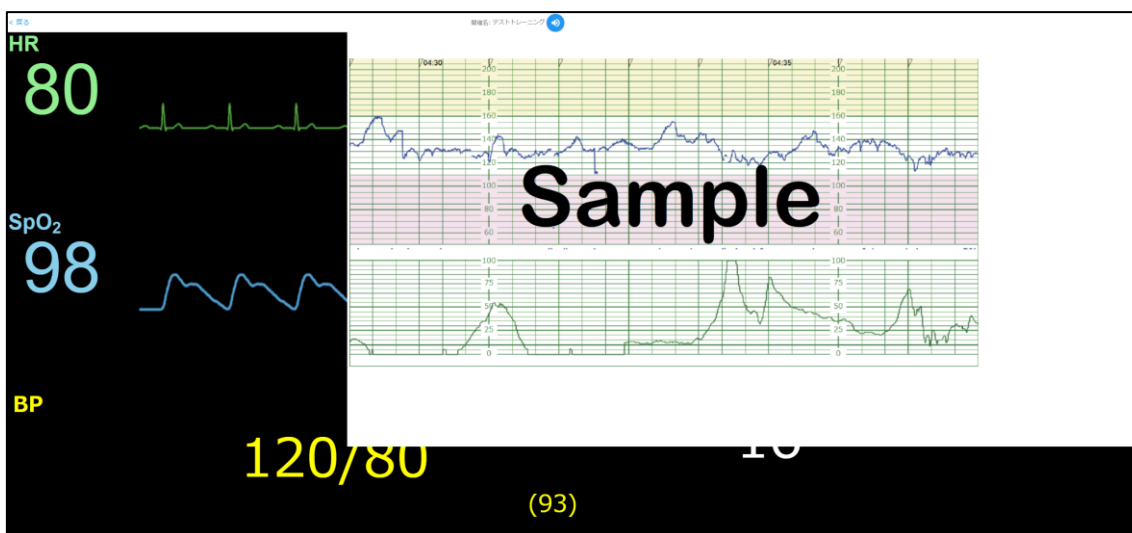

X線写真や何かしら患者の様子を表すような写真など任意の画像を設定しておいて、トレーニングの状況に合わせて説明をしたいときなど任意のタイミングで、トレーナー(インストラクター)が使うのに便利な機能です。

#### 4. シナリオの追加・編集など、各種設定

シナリオの追加・変更などの各種設定は「救トレ® クラウド マイページ」にて行います。「救トレ® クラウド マイページ」へのアクセスについては別に用意しております「[クイックスタートガイド](#)」にてご確認ください。



上掲が「救トレ® クラウド マイページ」の画面例です。画面左側に「設定(シナリオ等)」があります。これを選択下さい。以下の画面が表示されます。



「設定」ボタンを押して下さい。以下のような選択メニューが表示されます。



3つの選択メニューそれぞれについて次ページから説明します。


## 4.1 シナリオの追加・編集

以下のような画面が表示されます。なお、シナリオの表示順は画面最も左の三本線アイコンをつかんで上下にドラッグアンドドロップすることで変更可能です。



### A) シナリオの追加


画面左側「Scenario」の最下部にある赤い「+」アイコンを押して追加します。

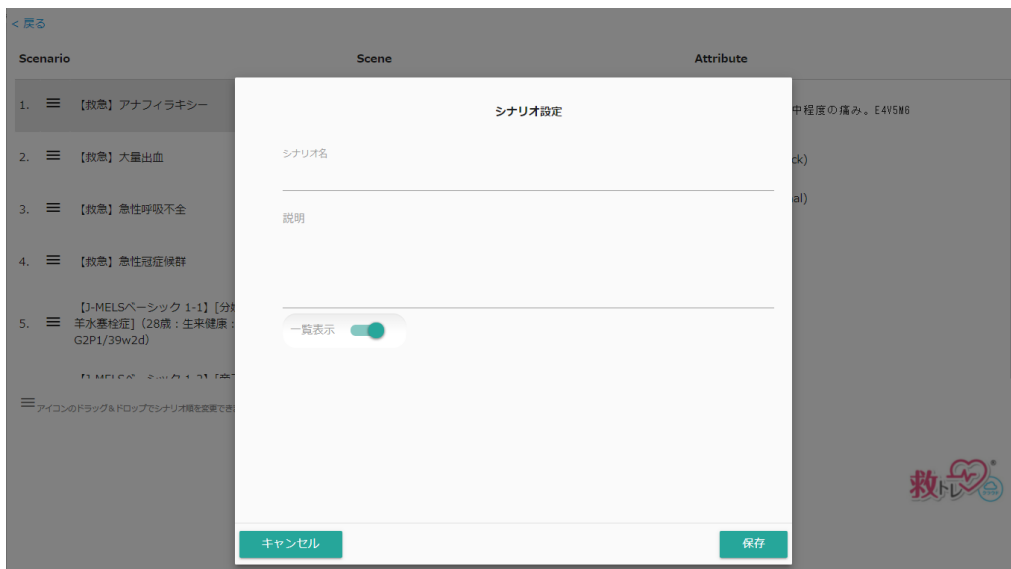


この画面で「シナリオ名」「説明」を入力して「保存」します。

なお「一覧表示」を Off にすると「シナリオとしては残しておくがシナリオ選択一覧には表示しない」という使い方ができます。シナリオがたくさんある場合に、一覧表示を絞りたい、というかた向けの機能です。

## B) シーンの追加

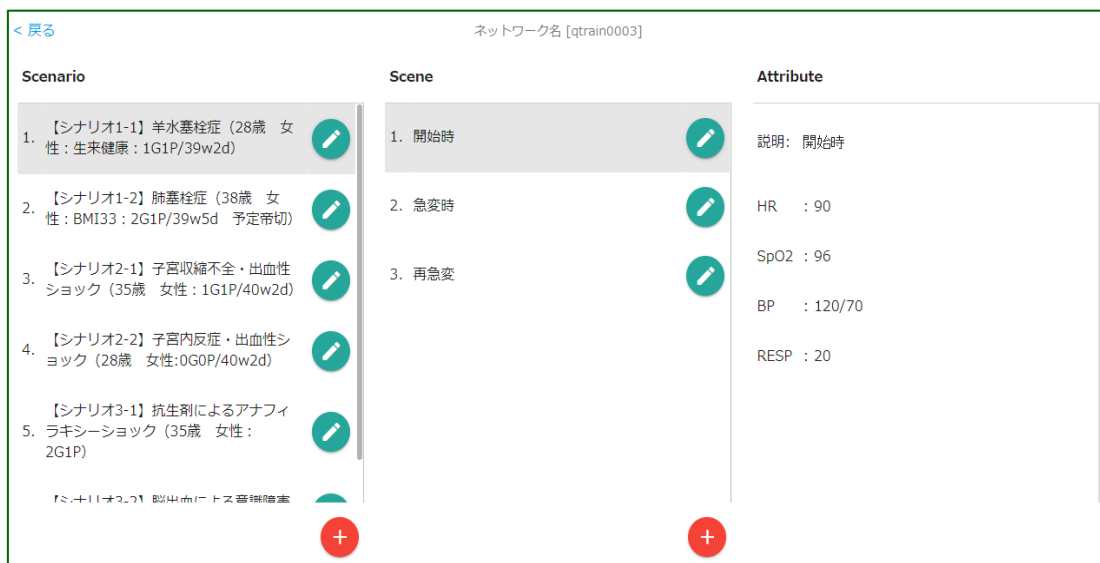


まず「シーン」を追加したい「シナリオ」を画面左側「Scenario」から選択してください。次に画面中央「Scene」の最下部にある赤い「+」アイコンを押して追加します。

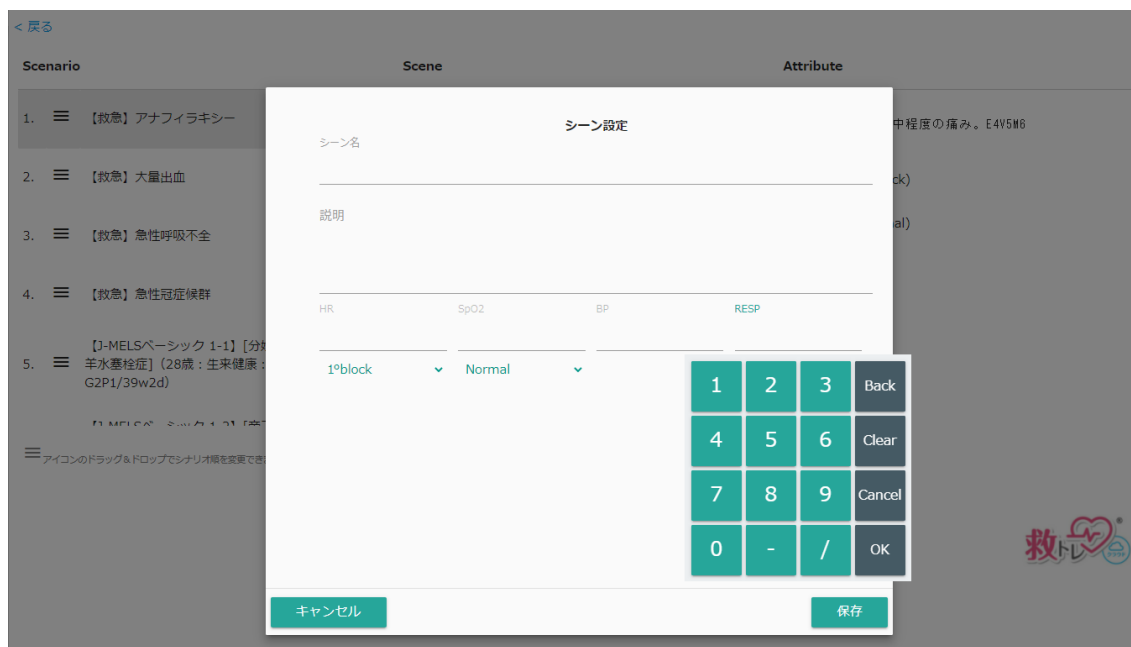


「シーン名」「説明」および各バイタルサイン値を入力し、「保存」を押して下さい。

### C) シナリオ/シーンの編集・削除・複製

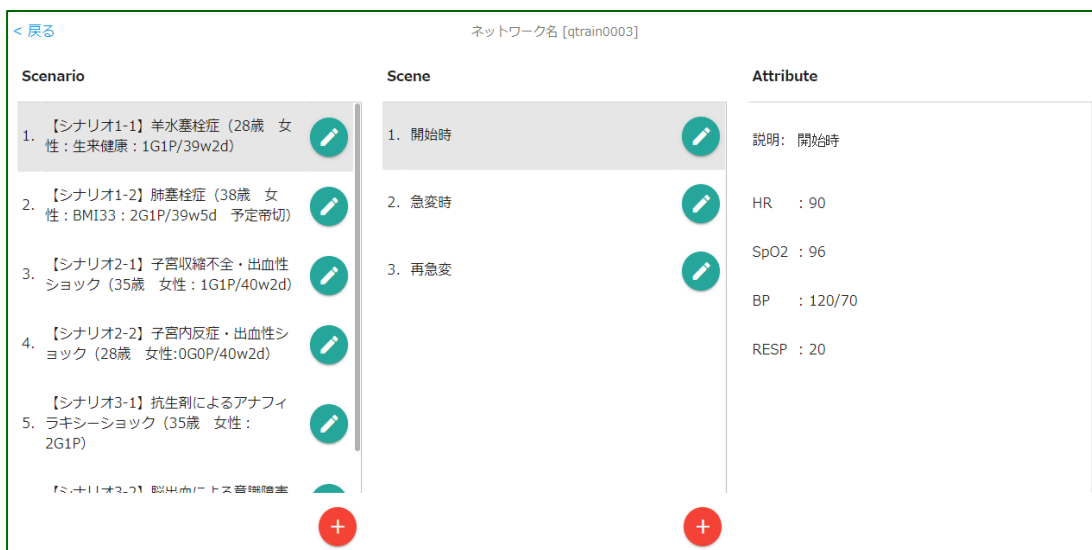

シナリオまたはシーン欄から「編集/削除」したい項目の右側の「鉛筆」アイコンを選択してください。編集画面が表示されます。

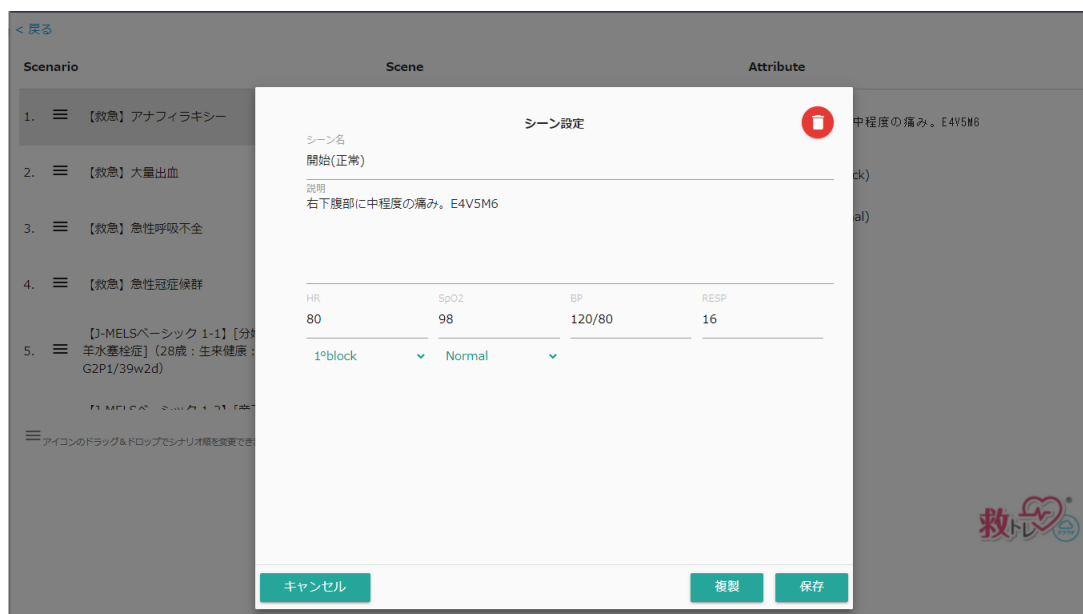

自由に内容を編集(変更)できます。編集(変更)が終わったら「保存」してください。

また「複製」ボタンを押すことで当該「シナリオ」あるいは「シーン」の複製ができます。複製された「シナリオ」や「シーン」は一番下に配置されますので、適宜順番の入



れ替え等を行って下さい。「複製」は「ちょっと変えたシナリオ/シーンを作りたい」時に便利です。

「シナリオ」や「シーン」の削除をしたいときは該当の「シナリオ」あるいは「シーン」を表示させ、右上の赤い「ゴミ箱」アイコンで削除下さい。



なお、「シナリオ」を削除するときは、そのなかの「シーン」を全て削除してからしか削除できない仕様としています。まだ「シーン」を含んでいる「シナリオ」の場合はゴミ箱アイコンが赤ではなく灰色に表示され削除ができなくなっています。含まれる「シーン」を全て削除してから「シナリオ」の削除を行って下さい。

#### D) シナリオ内シーンにおける血圧上下測定不能の入力方法

血圧が上下(収縮期血圧・拡張期血圧)ともに測定不能だという状態を指定することが可能です。

シーン設定

シーン名  
血圧測定不能

説明

HR	SpO2	BP	RESP
100	96		20
遷移秒数(0~600)	遷移秒数(0~600)		遷移秒数(0~600)

Normal - NSR    Normal

キャンセル    保存

シナリオ内の「シーン」としてバイタルサイン値セットを登録する際、血圧(BP)の値として数値パッド内の「-」を入力し、「OK」にて確定ください。以下の表記となります。

シーン設定

シーン名  
血圧測定不能

説明

HR	SpO2	BP	RESP
100	96	-	20
遷移秒数(0~600)	遷移秒数(0~600)		遷移秒数(0~600)

Normal - NSR    Normal

キャンセル    保存

トレーニング実施時にコントローラー画面にて指定する方法は[血圧表記として上下測定不能「-/-」指定をする](#)を参照ください。

## 4.2 共通設定

<戻る

【バイタルに関する設定】

測定項目	略称	文字色	警告設定
1.	BP	yellow	上限値 180 下限値 40 <input checked="" type="checkbox"/> 点滅 警告音 警告音1
2.	HR	green	上限値 150 下限値 30 <input checked="" type="checkbox"/> 点滅 警告音 警告音1
3.	SpO2	blue	上限値 下限値 94 <input checked="" type="checkbox"/> 点滅 警告音 警告音1
4.	RESP	white	上限値 40 下限値 11 <input checked="" type="checkbox"/> 点滅 警告音 警告音1

【その他の設定】

<モニター画面のロゴ>

表示する    
表示する 表示しない

保存



バイタルサインの文字や波形の色、警告音を鳴らす閾値(上限値・下限値)、警告時の点滅の有無、警告音の種類などを選ぶことができます。

## 4.3 画像設定

任意の画像を 12 個までプリセットし、トレーニング時に呼び出して『モニター』上に表示させることができます。3 ステップで画像をセットします。

The screenshot shows a web interface for configuring images. At the top left is a blue '< 戻る' button. Below it is a title bar: '【画像指定】 任意の画像を 12 個まで救トレ内に持たせることができます。3 ステップで登録してください。' followed by 'ステップ 1 : 画像置き場を選択'. A dropdown menu shows '未選択' and a grey '画像削除' button is to its right. Below this is a large empty rectangular area. At the bottom, there are three sections: 'ステップ 2 : 配置する画像を選択' with 'Browse' and 'Upload file' buttons and '(対応ファイル形式 : png, jpg, jpeg)' below; 'ステップ 3 : 配置' with an 'Upload' button and '(アップロードするファイルは3MBが上限となります)' below.

### ステップ 1. 画像置き場を選択

まず 12 個の画像置き場のうち、どこに画像を置くかを選択します。また、不要な画像は「画像削除」ボタンから削除下さい。

### ステップ 2. 配置する画像を選択

「Browse」ボタンから配置する画像を選択ください。対応しているファイル形式は png と jpg(jpeg)です。

### ステップ 3. 配置


「Upload」ボタンを押して、画像をアップロード(配置)します。ファイルサイズは 3MB が上限です。

## 5. よくある質問と答

弊社「救トレ<sup>®</sup>」サイトの「よくあるご質問(FAQ)」コーナーに、たくさんの「よくあるご質問と答」を掲載しています。随時追加も行っていきますので、是非ご覧ください。

<https://qtr.emersim.jp/FAQ.html>

なお、箱型のハードウェア「救トレ<sup>®</sup> ポータブル」と、本製品「救トレ<sup>®</sup> クラウド」それぞれの「よくあるご質問(FAQ)」を掲載しております。以下のように画面右側に「ポータブル」「クラウド」と対象製品を明記しておりますので本製品「救トレ<sup>®</sup> クラウド」をお使いの方は「クラウド」表記のFAQをご参考ください。

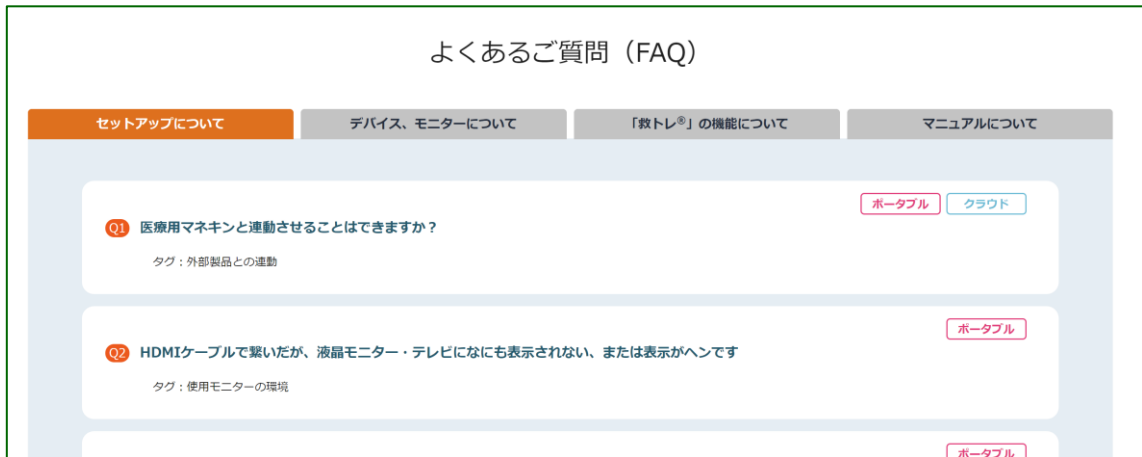

以上